




Med SSE System

CE 0197

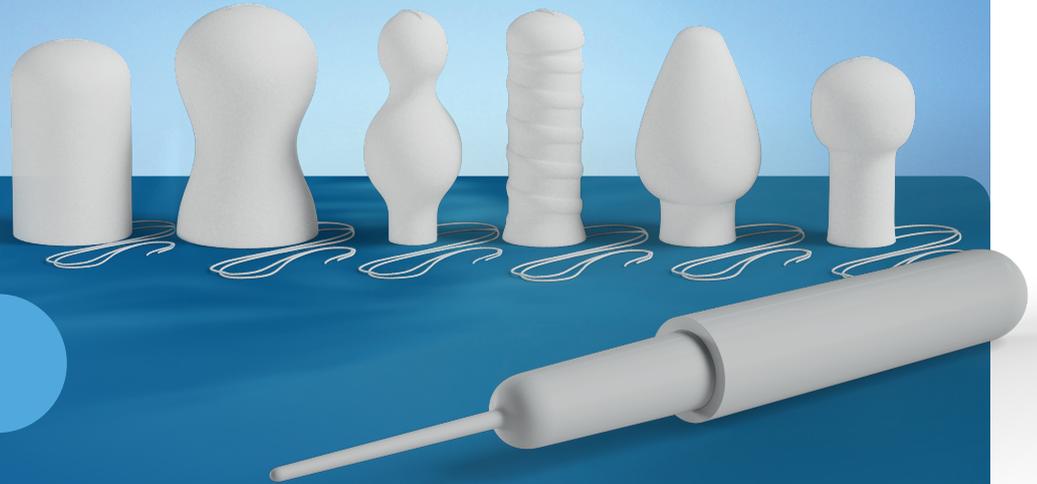

Produktinformation

A-Tam<sup>®</sup> Analtampons



Hilfsmittel-Nr. 15.25.17.0001

# Analtampons bei Stuhlinkontinenz

A-Tam<sup>®</sup> Analtampon bietet einen anatomisch gerechten sowie druckfreien Verschluss des Analkanals. Der Tampon ist mehr als ein Wäscheschutz, unsichtbar und verhindert Geruch. A-Tam<sup>®</sup> ist ein medizinisches, verordnungsfähiges Hilfsmittel und nach den aktuellen Richtlinien des Medizinproduktegesetzes zertifiziert. Der verwendete Polyvinylalkoholschaumstoff ist toxikologisch und dermatologisch unbedenklich sowie immunologisch inaktiv. Verschiedene Formen und Größen sichern eine optimale Versorgung.

## Stuhlinkontinenz wird hervorgerufen durch:

- Spina bifida
- Analatresie (mit nachträglicher Anlage eines Darmkanals)
- Diabetes
- MS
- Querschnittslähmung(en)
- Operationsschäden (Entbindungen, Hämorrhoiden)
- Krebsbehandlung (Strahlentherapie)
- Altersbedingt
- Muskelschwäche



## Wieder aktiv sein mit A-Tam®

Stuhlinkontinenz ist ein sehr persönliches Problem. Wir möchten, dass Sie sich selbst helfen können. Zur natürlichen Selbstbehandlung haben wir Tampons entwickelt, welche die Lebensqualität verbessern bzw. erhalten. Durch die Spezialverarbeitung des Schaumstoffs bilden sich an der Tamponoberfläche gezielt kelchartige Mikroporen. Diese saugnapfähnlige Ausbildung an der Oberfläche führt zu einer einzigartigen Abdicht- und Haltefunktion, welche einen immensen Produktvorteil bietet.

**Betroffene gewinnen Lebensqualität zurück, bleiben mobil und können sich wieder integrieren.**

Ferner wird ihnen eine große psychische Belastung genommen. Alltägliche Aufgaben wie Beruf, Haushalt, Einkaufen, Studium oder auch Schule können dank A-Tam® uneingeschränkt ausgeübt werden. Auch ihre Freizeit wie Sport (sogar schwimmen), Theater, Kino oder auch nur einen Ausflug mit der Familie können sie so unbeschwert und sorglos genießen.

**Vorteil:** Die Betroffenen können den Tampon selbst einsetzen.



# A-Tam<sup>®</sup> Startset A-Tam<sup>®</sup>

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.17.0001

Material: PVA Schaumstoff

Faden: Baumwolle



# Startset „Zylindrische Größen“

Artikel-Nr.: 5122      PZN-Nr.: 18826663

Art. Nr.	Form	Ø / Länge* (mm)
2200VC	Zylindrisch	20 / 40
2280VC	Zylindrisch	28 / 40
2330VC	Zylindrisch	33 / 40
2400VC	Zylindrisch	40 / 40
2450VC	Zylindrisch	45 / 40
7200	Applikator (groß)	

Krankenkasse bzw. Kostenträger  
 Musterkrankenkasse  
 Name, Vorname des Versicherten  
 Mustermann  
 Max  
 Musterstraße 5  
 XXXXX Musterstadt  
 geb. am  
 Kassen-Nr.      Versicherten-Nr.      Status:  
 Betriebsstätten-Nr.      Arzt-Nr.      Datum:  
 Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)  
 PVA-Analtampon Startset zylindrisch, Artikel-Nr. 5122,  
 5 Stück, PZN-Nr. 18826663 inkl. Applikator groß  
 Diagnose: ...  
 Hilfsmittelnummer 15.25.17.0001  
 Abgabedatum  
 in der Apotheke  
 Unterschrift des Arztes  
 Bei Arbeitsunfall  
 auszufüllen!  
 Unfalltag      Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

Startsets

**So wählen Sie die richtige Größe:** Das Startset beinhaltet Analtampons in den zylindrischen Größen (Inhalt 5 Stück) zum Ausprobieren inklusive einem großen Applikator zum Einführen.

\* Zirkwerte in feuchtem Zustand

# A-Tam<sup>®</sup> Startset Größe S

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.17.0001

Material: PVA Schaumstoff

Faden: Baumwolle



Inklusive zwei Applikatoren (groß und klein)

# Startset „Kleine Größen“

Artikel-Nr.: 5120

PZN-Nr.: 11320541

Art. Nr.	Form	Ø / Länge* (mm)
2153	Zylindrisch	15 / 40
2200VC	Zylindrisch	20 / 40
2280VC	Zylindrisch	28 / 40
1200	Konkav	20 / 66
1250	Konkav	25 / 66
0153	Spiral	15 / 40
0260	Spiral	26 / 62
3020	Konvex	24 / 50
3150	Kugel	15 / 53
3200	Kugel	20 / 58
7100	Applikator (klein)	
7200	Applikator (groß)	

Krankenkasse bzw. Kostenträger  
Musterkrankenkasse

Name, Vorname des Versicherten  
Mustermann  
Max  
Musterstraße 5  
XXXXX Musterstadt

Kassen-Nr. | Versicherten-Nr. | Status:  
Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum:

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)  
PVA-Analtampon Startset Größe S, Artikel-Nr. 5120,  
20 Stück, PZN-Nr. 11320541 inkl. Applikator groß und klein  
Diagnose: ...  
Hilfsmittelnummer 15.25.17.0001

Bei Arbeitsunfall auszufüllen  
Unfalltag | Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

Hilfsmittelnummer / Hilfsmittel-Nr. | Faktor | Taxe  
1. Verordnung  
2. Verordnung  
3. Verordnung

Vertragsarztempel

Abgabedatum in der Apotheke  
Unterschrift des Arztes

**So wählen Sie die richtige Größe:** Das Startset beinhaltet Analtampons in verschiedenen „kleinen“ Größen/Formen (Inhalt 20 Stück) zum Ausprobieren inklusive zwei Applikatoren (groß und klein) zum Einführen.

# A-Tam<sup>®</sup> Startset Größe L

Hilfsmittel-Nr.: 15.25.17.0001

Material: PVA Schaumstoff

Faden: Baumwolle



Inklusive zwei Applikatoren (groß und klein)

# Startset „Große Größen“

Artikel-Nr.: 5121

PZN-Nr.: 11320558

Art. Nr.	Form	Ø / Länge* (mm)
2330VC	Zylindrisch	33 / 40
2400VC	Zylindrisch	40 / 40
2450VC	Zylindrisch	45 / 40
1300	Konkav	30 / 66
1636	Kegel	37 / 82
0260	Spiral	26 / 62
0330	Spiral	33 / 62
3030	Konvex	33 / 62
3240	Kugel	24 / 58
3280	Kugel	28 / 66
7100	Applikator (klein)	
7200	Applikator (groß)	

Krankenkasse bzw. Kostenträger  
Musterkrankenkasse

Name, Vorname des Versicherten  
Mustermann  
Max  
Musterstraße 5  
XXXXX Musterstadt

Kassen-Nr. | Versicherten-Nr. | Status:  
Betriebsstätten-Nr. | Arzt-Nr. | Datum:

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

Hilfs-  
mittel-  
numm-  
er

15.25.17.0001

PVA-Analtampon Startset Größe L, Artikel-Nr. 5121,  
20 Stück, PZN-Nr. 11320558 inkl. Applikator groß und klein  
Diagnose: ...  
Hilfsmittelnummer 15.25.17.0001

Bei Arbeitsunfall auszufüllen  
Unfalltag | Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

**So wählen Sie die richtige Größe:** Das Startset beinhaltet Analtampons in verschiedenen „großen“ Größen/Formen (Inhalt 20 Stück) zum Ausprobieren inklusive zwei Applikatoren (groß und klein) zum Einführen.

# Der Weg zur passenden Größe

Bei entsprechenden Indikationen werden die Kosten von den Krankenkassen übernommen, da Hilfsmittel Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sind.

- 1** Um zu Beginn der Therapie mit A-Tam® Analtampons gezielt die richtige Form und Größe zu ermitteln, sollte eines unserer Startsets verordnet werden.  
**Tipp:** Beim erstmaligen Erproben der Tampons bitte mit der kleinsten Größe des jeweiligen Startsets beginnen.
- 2** Nachdem die richtige Größe ermittelt wurde, kann vom behandelnden Arzt eine Folgeverordnung über den ausgewählten, passenden Tampon ausgestellt werden. PZN-Nummern und weitere Details zu den verschiedenen Formen und Größen finden sie auf den Folgeseiten oder online auf unserer Website.

**Für Ihren Arzt / Ihre Ärztin:**

Das Budget des verordnenden Arztes wird hierbei nicht belastet!

# Bezugsquellen



## Fachhandel

Reichen Sie Ihr Rezept bei einem Hilfsmittel-Vertragspartner Ihrer Krankenkasse ein (z. B. Apotheke/Home-care-Unternehmen/Sanitätshaus) Diese übernehmen den gesamten Genehmigungs- und Bestellvorgang, sowie die Abrechnung des Medizinproduktes.



## Direktbezug über Med SSE

Senden Sie das Rezept per Post an unsere Anschrift. Wir sind Vertragspartner vieler Krankenkassen. Eine Auflistung finden Sie unter [www.medsse.de](http://www.medsse.de).



## Online-Shop

Bestellen Sie schnell, einfach und bequem, auf eigene Rechnung, in unserem Online-Shop.

<https://shop.medsse.de>





## A-Tam® Zylindrisch

Einsatz wenn noch eine Restfunktion des Schließmuskels vorhanden, aber durch zu schwache Ausbildung keine Abdicht- und Haltefunktion gewährleistet ist.



## A-Tam® Spiral

Dieser Tampon bringt auch für Problemfälle die optimale Versorgung. Durch die spiralförmige Anordnung von Rillen auf der Oberfläche des Analtampoons wird eine verbesserte druckfreie Verankerung an der Darmschleimhaut erreicht. Bei Vorliegen einer leichten oder mittelschweren Diarrhoe kann über die auf der Oberfläche vorhandenen Rillen der überhöhte Gasdruck abgeleitet werden.

Art. Nr.	Form	∅ / Länge* (mm)	PZN	Menge
2153	Zylindrisch	15 / 40	12551656	90 St.
2200VC	Zylindrisch	20 / 40	18831227	30 St.
	Zylindrisch	20 / 40	19223978	90 St.
2280VC	Zylindrisch	28 / 40	18831233	30 St.
	Zylindrisch	28 / 40	19223984	90 St.
2330VC	Zylindrisch	33 / 40	18831256	30 St.
	Zylindrisch	33 / 40	19223990	90 St.
2400VC	Zylindrisch	40 / 40	18831262	30 St.
	Zylindrisch	40 / 40	19224009	90 St.
2450VC	Zylindrisch	45 / 40	18831279	30 St.
	Zylindrisch	45 / 40	19224021	90 St.

Art. Nr.	Form	∅ / Länge* (mm)	PZN	Menge
0153	Spiral	15 / 40	12551509	90 St.
0220	Spiral	22 / 62	12551544	90 St.
0260	Spiral	26 / 62	12551550	90 St.
0330	Spiral	33 / 62	12551567	90 St.



## A-Tam® Konkav

Dieser Tampon ist in erster Linie für Patienten entwickelt worden bei denen die konvexe Ausformung des Muskelgewebes vorhanden ist. Durch die taillierte Tamponform wird im Analkanal eine Halte- und Abdichtfunktion ermöglicht. Der Schließmuskel schmiegt sich in diesem Fall der Form des Konkav-Tampons an. Dieser erfüllt somit eine optimale Abdichtfunktion und sitzt absolut sicher.

Art. Nr.	Form	Kopf / Länge* (mm)	PZN	Menge
1160	Konkav	26 / 66	12551225	90 St.
1180	Konkav	28 / 66	12551320	90 St.
1200	Konkav	30 / 66	12551389	90 St.
1250	Konkav	33 / 66	12551426	90 St.
1300	Konkav	40 / 66	12551455	90 St.
1350	Konkav	45 / 66	12551461	90 St.



## A-Tam® Kugel

Speziell entwickelt für analinkontinente Patienten, die über keinerlei Restfunktionen des Muskelgewebes verfügen und deren Analkanal eine glatte Muskulatur aufweist. Ein Konkav- oder Zylindertampon hätte also keinen sicheren Halt. Durch die Kugelform der Tamponkuppe erreicht der Tampon in Höhe der Ampulla recti (Bereich, in dem sich normalerweise der Stuhl vor der Entleerung sammelt) ähnlich einem Kugelventil die gewünschte Halte- und Abdichtfunktion. Die kugelförmig ausgebildete Kuppe kommt oberhalb des Schließmuskels zum Liegen.

Art. Nr.	Form	Kopf / Länge* (mm)	PZN	Menge
3150	Kugel	26 / 53	12551142	90 St.
3180	Kugel	28 / 58	12551159	90 St.
3200	Kugel	30 / 58	12551165	90 St.
3240	Kugel	33 / 58	12551171	90 St.
3280	Kugel	40 / 66	12551202	90 St.



## A-Tam® Kegel

Die kegelförmige Ausführung eignet sich ausgezeichnet für alle Inkontinenz-Indikationsmöglichkeiten. Die abgerundete Kuppe des Tampons wirkt wie ein Kugelventil im Bereich des Übergangs Enddarm zu Darmkanal. Im Darmkanal wird eine sehr gute Abdichtung durch die Verdickung im Mittelteil des Tampons erreicht. Die Verjüngung am Tamponende passt sich gut der Anatomie des Analkanals an.

Art. Nr.	Form	Ø/Länge* (mm)	PZN	Menge
1628	Kegel	30 / 66	12551596	90 St.
1636	Kegel	37 / 82	12551573	90 St.



## A-Tam® Konvex

Findet Verwendung bei Betroffenen, die über ein stark zurückgebildetes Muskelgewebe verfügen. Gegebenenfalls stimuliert der Tampon den Schließmuskel so stark, daß ein kontrollierter Stuhlgang möglich wird.

Art. Nr.	Form	Ø/Länge* (mm)	PZN	Menge
3020	Konvex	24 / 50	12551604	90 St.
3030	Konvex	33 / 60	12551610	90 St.

## Applikatoren

Zum besseren Einführen des im feuchten Zustand weichen und instabilen Tampons.




Art. Nr.	Form	PZN	Menge
7200	Groß	02014845	1 St.
7100	Klein	02014839	1 St.

**Für den Arzt:** Die Verordnung des Applikators muss bei Bedarf mit auf dem Rezept enthalten sein. In den Startsets ist er bereits enthalten.

## Analsicherung (latexfrei)

Zusätzliche selbsthaftende Sicherung (latexfrei), um bei bewegungsaktiven Betroffenen (z.B. Rollstuhlsport) das Herausgleiten des Tampons zu vermeiden.

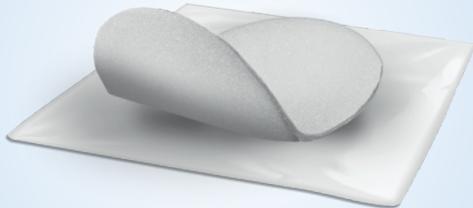

Art. Nr.	Form	PZN	Menge
7400	Rund	01984895	100 St.
7401	Oval	01985015	100 St.

# Anwendungshinweise

CE 0197

Bitte gehen Sie wie nachstehend in Wort und Bild beschrieben bei der Einführung des Tampons vor. Die Vorgehensweise ist vergleichbar wie bei einem Suppositorium (Zäpfchen). Dieses Produkt ist aufgrund der allgemein geltenden Hygienevorschriften ein Einmalprodukt. Die Einführhilfe (Applikator) ist mehrfach verwendbar.



Hände mit Wasser und Seife waschen. Analbereich sorgfältig reinigen.



Schutzfolie an der Perforierung aufreißen und Tampon entnehmen. Rückholfaden aus der Innenbohrung ziehen.



Tampon in warmem Wasser kurz einweichen. Danach Wasser ausdrücken.



Tampon mit der Innenbohrung auf den Dorn des Applikators aufstecken. Je nach Bedarf kann Vaseline auf die Tamponkuppe aufgetragen werden.



Tampon mit Applikator weit genug in den Darmkanal einführen, so dass der Rückholfaden sichtbar ist.



Beim Herausziehen des Applikators die Gesäßbacken zusammenkneifen. Anschließend Rückholfaden fixieren.



Nach dem Einführen Hände gründlich waschen. Nach Gebrauch Tampon mit Hilfe des Rückholfadens entfernen und über den Hausmüll entsorgen!



**Med SSE System**

GmbH  
Alfred von der Lehr

Herderstraße 5–9  
D-90427 Nürnberg  
Tel.: 0911 / 790 88 06

Fax: 0911 / 79 23 37  
[www.medsse.de](http://www.medsse.de)  
[info@medsse.de](mailto:info@medsse.de)

